

使用上のご注意

●本品は疾患の治療が目的ではありません。●痛みや異常を感じられる場合は医師にご相談ください。●使い始めは短時間でお試しいただき、問題なければ着用時間を延ばしてください。●無理な締め付けは身体に負担がかかりますのでおやめください。●締め付けの度合いによりサポート力には個人差が生じます。●ベルトの取付面にホコリなどが付着すると固定力が弱まる場合があります。付着物を取り除いてご使用ください。●色落ちすることがありますので、他の物とのお洗濯はお避けください。●用途以外でのご使用はおやめください。●洗濯の際は、マジックテープ®を本体にとめてください。とめずに洗濯すると、マジックテープのつきが悪くなるおそれがあります。●就寝時には使用しないでください。●長時間使用する際には、適度に着脱または緩めて使用してください。●アレルギー体質、湿疹性、汗でかぶれやすい方はご使用にならないでください。●着け心地が悪いなど違和感がある場合は直ちに使用を中止してください。●足首痛などで通院されている方及び関節炎等、足首に炎症のある方はご使用の前に医師にご相談ください。

製品改良のため予告なく仕様変更する場合がございます。

●「マジックテープ®」は(株)クラレの登録商標です。