

使用上のご注意

●本品は腰部固定以外の用途には使用しないでください。●本品の使用に際してかぶれ等、何らかの不都合が生じた場合は速やかに使用を中止し、医師にご相談ください。●長時間、長期間の使用及び使用状況によって破損する場合があります。破損した場合は、速やかに使用を中止してください。そのまま使用するとケガをしたり、衣服などを破損する場合があります。●肌着の上から装着してください。●就寝時の装着は避けてください。●高温多湿、直射日光を避けて保管してください。(変色の原因になります)※変色しても素材強度に問題はありません。●洗濯の際は中性洗剤を使用し、マジックテープを傷める場合がありますので優しく押し洗いしてください。柔軟剤、漂白剤、ドライクリーニングは避けてください。色落ちの可能性があるため本品のみで洗ってください。●乾燥は日陰干しにして、アイロンは使用しないでください。●洗濯の際は、マジックテープ®を本体にとめてください。とめずに洗濯すると、マジックテープ®のつきが悪くなるおそれがあります。●きつく締め過ぎないように注意してください。●長時間使用する際には、適度に着脱または緩めて使用してください。●アレルギー体質、湿疹性、汗でかぶれやすい方はご使用にならないでください。●腰痛などで通院されている方及び関節炎等、腰に炎症のある方はご使用の前に医師にご相談ください。

製品改良のため予告なく仕様変更する場合がございます。

●「マジックテープ®」は(株)クラレの登録商標です。