

## 使用上のご注意

- 着用中、着用後に発疹、かゆみ、かぶれ等の症状が生じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- ズレやゆるみ、過度の圧迫などが無いよう装着してください。使用中、ズレやゆるみ、過度の圧迫などが発生したら直ちに正しく装着し直してください。ズレやゆるみ、過度の圧迫などがあると確実な保持性が得られず、症状を悪化させる危険性がありますので十分ご注意ください。
- 製品の特性上、部分的に強い力が加わったり、爪などで引っ掛けると、引きつれたり、破れる恐れがありますのでご注意ください。
- 長時間の使用や使用状況によっては破損する場合があります。破損した場合は速やかに使用を中止してください。
- 装着部に傷、腫れ、発疹などがある場合には使用しないでください。
- サポーターと消炎鎮痛剤など医薬品との併用はお控えください。(繊維を劣化させる恐れがあります。)
- 夜間就寝時の使用は、医師の指示に従って装着してください。
- 本品は改造しないでください。

## 保管上のご注意

- 火の近くや高温になる場所には置かないでください。
- 小児の手の届かない場所に保管してください。