

## 使用上のご注意

※磁石部分の改造等を行わないでください。※ご使用の際は添付文書等をよくお読みください。※製品の仕様 価格 デザインなど予告なく変更になる場合がございます。

※ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している方は使用しないでください。

※商品は腰部固定以外の用途には使用しないでください。※商品の仕様に際してかぶれ等何らかの不都合が生じた場合は速やかに使用を中止し、医師にご相談ください。※長時間、長期間の使用及び使用状況によって破損する場合があります。破損した場合は、速やかに使用を中止してください。そのまま使用するとケガをしたり、衣服などを破損する場合があります。※お肌が敏感な方は、肌着の上からの装着をおすすめします。※就寝時の装着は避けてください。※高温、直射日光を避けて保管してください。(変色の原因になります) ※変色しても素材強度に問題はありません。※洗濯の際は中性洗剤を使用し、手洗いしてください。ステイが変形したり、型崩れの恐れがありますので洗濯機、ドライクリーニングのご使用はお控えください。柔軟剤は使用しないでください。マジックテープ及びパイル地を傷めますので洗濯時には注意してください。色落ちの心配がある場合は、本品のみで洗ってください。※乾燥は日陰干しにしてください。

※「マジックテープ®」は(株)クラレの登録商標です。