

使用上のご注意

- 以下のような磁気の影響を受ける可能性のある医用電気機器を装着している人は使用しないでください。
 - ・ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植え込み型医用電気機器を使用している人。
 - ・脳せき（背）髄液短絡術用圧可変式シャントなどの磁気影響を受ける可能性のある医用電気機器を使用している人。

使用前のご注意

●次の人は使用前に医師に相談して下さい。(適用対象（患者）)・悪性しゅよう（腫瘍）のある人・心臓に障害のある人・妊娠初期の不安定期又は出産直後の人・糖尿病などによる高度な末しょう（梢）循環障害による知覚障害のある人・皮膚に感染症及び / 又は創傷のある人・安静を必要とする人・体温 38以上（有熱期）の人（一急性炎症症状【けん（倦）怠感、悪寒、血圧変動など】の強い時期。一衰弱しているとき。）●時計、磁気カードなどの磁気の影響を受けるものには近づけないでください。●使用前に縫製の破れが無いことや磁石装着部に破れが無い、また金属の異物が吸引付着していないかを確認してからご使用ください。●他の治療器と同時に使用しないでください。●改造又は分解しないでください。●故障した場合は勝手に修理などせずに販売店に連絡してください。●頭部には使用しないでください。●取り扱いに関しては同梱の取扱説明書をよく読み、使用してください。●本品は腰部固定以外の用途には使用しないでください。●本品の使用に際してかぶれ等、何らかの不都合が生じた場合は速やかに使用を中止し、医師にご相談ください。●長時間、長期間の使用及び使用状況によって破損する場合があります。破損した場合は速やかに使用を中止してください。そのまま使用すると怪我をしたり、衣服などを破損する場合があります。●肌着の上から装着してください。●就寝時の装着は避けてください。●高温、直射日光を避けて保管してください（変色の原因になります）※変色しても素材強度に問題はありません。●洗濯の際は中性洗剤を使用し、マジックテープ®を傷める場合がありますので優しく押し洗いしてください。柔軟剤、漂白剤、ドライクリーニングは避けてください。色落ちの可能性があるので本品のみで洗ってください。●乾燥は日陰干しにして、アイロンは使用しないでください。