

## お取扱いの注意

- ・ 体質などにより、着用時肌に異常（かゆみ、かぶれなど）を起こす場合があります。異常を感じた場合は、使用を中止してください。
- ・ 濡れた状態での放置や浸け置き洗いは、お避けください。
- ・ 洗濯や、着用、摩擦により色落ちや色移りしたり、滑り止め樹脂が剥がれる場合がありますので、ご注意ください。
- ・ 洗濯の際は、ファスナー、ボタン、面ファスナーを閉じて洗濯してください。
- ・ 蛍光増白剤のっていない洗剤を使用してください。
- ・ タンブラー乾燥は、お避けください。
- ・ 長さ調節器具は、引っかかったり摩擦により、他の衣類を傷つける場合がありますので、ご注意ください。
- ・ 素材の特性上、湿気や日光（紫外線）の影響を受けたり、長期の使用による経年劣化で伸びが生じる場合がありますので、ご注意ください。

## ▲ 注意 ▲

### 【次の方は使用しないでください】

- 腰痛等で異常がある方
- ベルト装着部位に傷、腫れ物、湿疹等異常がある方

### 【使用上の注意】

- 本製品の使用中に異常、違和感を感じた場合は直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。
- 長時間及び就寝時の着用はお避けください。
- 長時間使用する場合は適度にベルトを緩めてください。
- 腹部を圧迫しすぎず、適度な強さで使用してください。
- 本製品を使用して過度に重いものを持つことや必要以上に腰に負担のかかる姿勢をとることはおやめください。
- サポーター類の他商品との同時装着はしないでください。
- 加工、改造、修理はしないでください。
- 取扱説明書に示した用途以外のご使用は怪我や破損の原因となりますのでお止めください。
- 長期使用、保管による経年劣化、破れやほつれ等が生じた場合には新しい製品のご購入をおすすめします。